



STAPPENKAART

**MAAK HET JEZELF
MAKKELIJK**

Aanspannen en prikken in 1 klik



Prikdiepte instellen
Draai de instelling voor de juiste prikdiepte



Bloeddruppel verkrijgen
Aanspannen en prikken in 1 klik



Lancet vervangen
Beweeg het hendeltje heen en weer voor een nieuw lancet

Lancethouder vervangen



Verwijder de dop



Plaats de lancethouder



Doe de dop weer op de pen




Ongebruikte lancethouder


Gebruikte lancethouder

Vervang de houder nadat je het laatste lancet hebt gebruikt. De lancethouder kan niet worden herplaatst

Clixmotion® technologie voor minder pijnlijk prikken

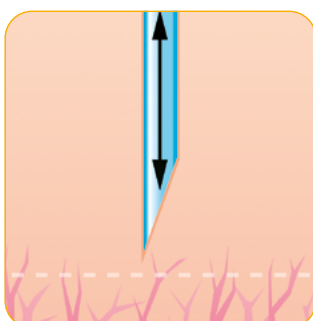

Met Clixmotion

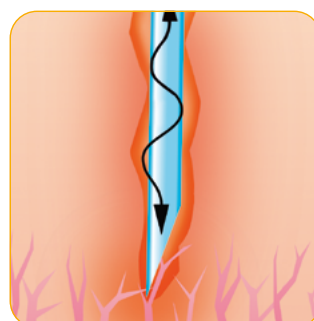

Zonder Clixmotion



- Met gepatenteerde technologie die het lancet vanuit twee richtingen stuurt.
- Zorgt voor een soepele beweging van het lancet.
- Lancet heeft een smaller wordend, drievlaks geslepen naaldpunt voor verminderde pijn en een soepele doordringing van de huid.

De Accu-Chek FastClix is bedoeld voor gebruik bij zelfcontrole door één persoon. De prikken mag niet worden gebruikt voor het afnemen van bloed bij verschillende personen, omdat hiervoor geen speciale voorzieningen ter voorkoming van infectiegevaar getroffen zijn.