

Stappenplan ampul vervangen

W


Naald



- Gebruik altijd een nieuwe adapter als je de ampul vervangt.
- Er bevindt zich een naald in het midden van de adapter.
- Insulinetoediening kan alleen worden gegarandeerd als deze naald loodrecht in het midden van de ampul wordt geplaatst (zie stap 11).
- Koppel de infusieset altijd af van het lichaam voordat je de ampul vervangt.
- Als er (b.v. voor trainingsdoeleinden) een lege ampul in de insulinepomp is geplaatst, geeft de insulinepomp de ingestelde insulinetoedieningen (vullen van de infusieset, basale dosering en bolustoedieningen) weer. Zelfs als er, omdat de ampul leeg is, geen insuline wordt toegediend.
- Als een onjuist type ampul wordt geselecteerd, kan dit leiden tot een te lage of te hoge toediening van insuline.


Stap 1: Ampul verwijderen

1

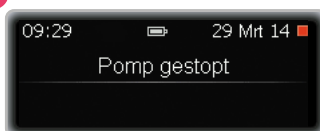

Druk in het statusscherm op .

2

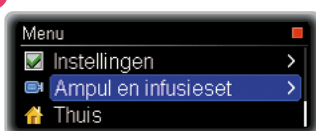

Het hoofdmenu **Menu** verschijnt. Druk op  om naar **Ampul en infusieset** te gaan. Druk op  om dit te selecteren.

3



Het menu **Ampul en infusieset** verschijnt. Druk op  om **Ampul vervangen** te selecteren.

4



Het scherm **Ampul vervangen** verschijnt.

5



Houd de insulinepomp rechtop. Draai de adapter met de slang linksom.

6



Verwijder de adapter met de ampul als er een hoek van circa 120° is bereikt.

7



Belangrijk: Druk op  om te bevestigen dat je de adapter en de ampul hebt verwijderd. De insulinepomp start automatisch met het terugdraaien van de aandrijfstang.

8



Als de aandrijfstang niet wordt teruggedraaid, kan je insulinepomp of ampul worden beschadigd.

9



Als de insulinepomp gereed is met het terugdraaien van de aandrijfstang, krijg je de aanwijzing om de nieuwe ampul te plaatsen en de adapter aan te sluiten.

Plaats alleen een nieuwe ampul, als het scherm **Plaats nieuwe ampul en sluit de adapter aan verschijnt.**

- Controleer altijd de ampul, met inbegrip van de rubber zuiger aan de onderkant van de ampul. De ampul niet gebruiken als er een beschadiging of lekkage te zien is of als de rubber zuiger tot voorbij de witte band aan

de onderkant van de ampul is opgetrokken. Dit kan namelijk veroorzaakt zijn door het lekken van insuline. Denk je dat de ampul beschadigd is, stuur deze dan terug naar je leverancier.

- Gebruik nooit een ampul die is gevallen, beschadigd of gebarsten.

BELANGRIJK!

Stap 2: Nieuw ampul plaatsen

Zorg ervoor dat de ampul en de insuline op kamertemperatuur zijn.

10



Zorg ervoor dat je de insulinepomp rechtop houdt. Plaats de ampul – de zuiger eerst – in het ampulcompartiment.

JUIST



Zorg ervoor dat de ampul correct is geplaatst. Als de ampul niet is geplaatst zoals weergegeven, moet je de **stappen 1 t/m 7 controleren**.

ONJUIST



Druk de ampul niet verder in de insulinepomp, als de ampul uit de insulinepomp steekt. Anders kan de insulinepomp of de ampul beschadigd worden. Zorg ervoor dat de aandrijfslag volledig is teruggedraaid. Als de aandrijfslag niet volledig is teruggedraaid, dien je contact op te nemen met de Roche Diabetes Service.

11



Plaats een nieuwe adapter op de uitsparing van de bajonetsluiting van het ampul-compartiment. Zorg ervoor dat je de adapter onder een rechte hoek (90°) in de uitsparing van de behuizing van de insulinepomp plaatst. Anders kan de naald worden verbogen.

JUIST



Plaats de adapter **uitsluitend zoals beschreven in stap 11** op de uitsparing van de bajonetsluiting van het ampulcompartiment.

ONJUIST



Plaats de adapter **niet op de uitsparing** van de bajonetsluiting van het ampulcompartiment, als de adapter niet is geplaatst, zoals beschreven in **stap 11**.

12



Draai de adapter rechthoekig tot dit niet verder gaat. De adapter is correct geplaatst als deze op één lijn ligt met de behuizing van de insulinepomp. Druk vervolgens op om dit te bevestigen.

13



Het scherm **Type ampul** verschijnt. Druk op of om het juiste type ampul te kiezen. Druk op om dit te selecteren.

14




Controleer of de infusieset afgekoppeld is. Druk op om dit te bevestigen.

15



De insulinepomp detecteert de positie van de zuiger in de ampul.

16

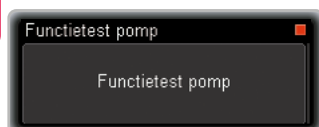

De insulinepomp voert vervolgens een functietest uit.

17



Na de functietest keert de insulinepomp terug naar het menu **Ampul en infusieset**. Slang vullen wordt automatisch geselecteerd.