

# Belangrijke informatie voor gebruikers die de Accu-Chek Insight-insulinepomp met de NovoRapid® PumpCart® 100 eenheden/ml oplossing voor injectie in ampul gebruiken

## Zorgvuldig lezen


Behandel de insulinepomp en de ampul zorgvuldig. Volg de gebruiksaanwijzingen.

Als de insulinepomp of de ampul verkeerd of niet zorgvuldig worden gehanteerd, kan de insulinetoediening onjuist zijn. Dat kan leiden tot een te lage of te hoge bloedglucosespiegel.

Neem de volgende instructies in acht. Ze bevatten belangrijke informatie voor het gebruik van de Accu-Chek Insight-insulinepomp met de NovoRapid® PumpCart®.

### Volg deze stappen voordat u een nieuwe ampul in uw insulinepomp plaatst:

- 1 Lees de gebruiksaanwijzing van de insulinepomp en de gebruiksaanwijzing voor de ampul.
- 2 Laat de ampul liggen totdat deze op kamertemperatuur is gekomen.
- 3 Open de blisterverpakking en haal de ampul eruit.
- 4 Controleer of er **NovoRapid® PumpCart®** op het etiket staat.
- 5 Controleer of de vervaldatum van de ampul niet is overschreden. De vervaldatum staat op het etiket en op de doos.
- 6 Controleer het uiterlijk van de ampul. De ampul moet eruitzien zoals op de foto: Alleen de bovenkant van de zuiger zou boven de rand van het witte etiket zichtbaar mogen zijn.

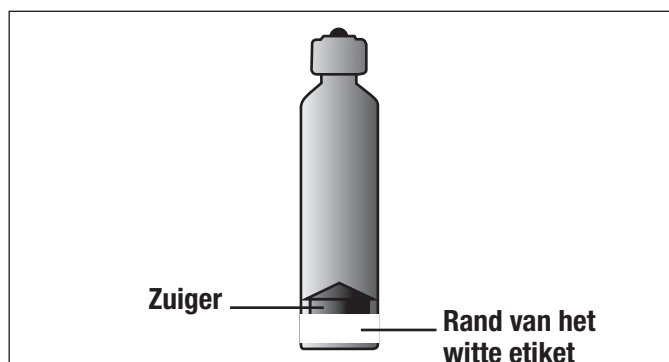

7 Controleer elke ampul op scheurtjes of beschadigingen.

8 Controleer de ampul op lekkage.

### De ampul niet hergebruiken

- als de onderkant van de zuiger zichtbaar is boven de rand van het witte etiket.
- als de ampul beschadigd is of scheurtjes vertoont.
- als de ampul lekt.
- als de ampul is gevallen, ook al lijkt hij onbeschadigd.

In al die gevallen en als u schade vermoedt, breng de ampul dan terug naar uw leverancier.

Controleer of de insuline in de ampul helder en kleurloos is. Gebruik de ampul niet als de insuline er troebel uitziet.

De ampul kan een kleine hoeveelheid lucht bevatten in de vorm van kleine luchtbelletjes.

### Terwijl de ampul in gebruik is

Controleer uw insulinepomp, de infusieset en de ampul regelmatig op beschadigingen, bijvoorbeeld scheurtjes of lekkages. Als u insuline ruikt, kan dat duiden op een lek. Als er insuline uit de infusieset of de ampul lekt, kan de insulinetoediening onvoldoende zijn en leiden tot hoge glucosewaarden. Vervang de infusieset en de ampul. Als er insuline uit de ampul lekt, moet u het ampulcompartiment van uw insulinepomp reinigen. Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van uw insulinepomp.

Controleer uw bloedglucosegehalte zo vaak als uw arts of medisch team u opdraagt (ten minste 4 maal per dag).

Voordat u gaat slapen, wordt u geadviseerd ervoor te zorgen, dat:

- de insulinepomp zich in de RUN-modus bevindt.
- de ampul voor de nacht voldoende insuline bevat.
- de infusieset en de ampul niet lekken.

De insulinepomp kan niet detecteren wanneer de infusieset of de ampul lekt. De insulinepomp geeft u **geen** melding van problemen met de insulinetoediening als gevolg van een lekkend onderdeel. Als u een probleem met de insulinetoediening vermoedt, vervang dan de infusieset en de ampul.

Houd altijd een alternatieve methode voor het toedienen van insuline bij de hand, bijvoorbeeld een insulinepen. Als de insulinepomp niet meer werkt, schakel dan over op een alternatieve methode volgens de instructies van uw zorgteam.

ACCU-CHEK en ACCU-CHEK INSIGHT zijn merken van Roche. NovoRapid® en PumpCart® zijn geregistreerde handelsmerken van Novo Nordisk A/S, Denemarken. © 2023 Roche Diabetes Care.

www.accu-chek.com | Roche Diabetes Care GmbH | Sandhofer Strasse 116 | 68305 Mannheim, Germany