



Infusieset plaatsen

De Accu-Chek Insight Rapid infusieset is bedoeld voor het toedienen van insuline met de Accu-Chek Insight insulinepomp.

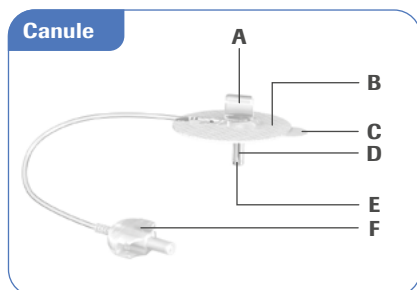


- A. Handgriep
- B. Zelfklevende pleister
- C. Afdekfolie
- D. Naaldbeschermer
- E. Stalen naald
- F. Verbindingsstuk

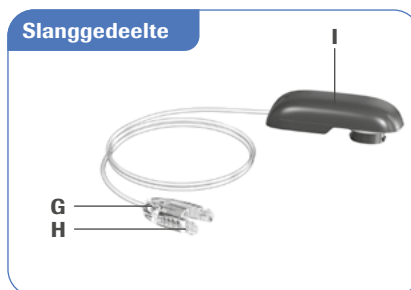

- A. Handgriep
- B. Zelfklevende pleister
- C. Afdekfolie
- D. Naaldbeschermer

Voordat de infusieset voor het eerst gebruikt wordt, moeten de juiste instellingen van de slang en canule in de insulinepomp ingevoerd worden zoals in de tabel hieronder beschreven staat.


Voorbereiden van de infusieset – Verbind het slanggedeelte met de canule

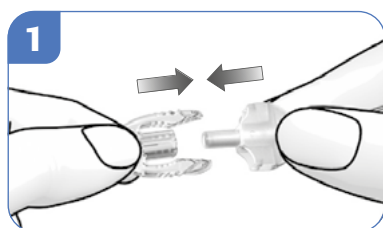

Was je handen goed en droog ze goed af. Bevestig het slanggedeelte aan de canule door de twee verbindingsstukken in elkaar te klikken.



Volg de instructies voor het plaatsen van een nieuwe adapter zoals beschreven staat in de handleiding. Zorg ervoor dat de adapter verbonden is met de insuline ampul.

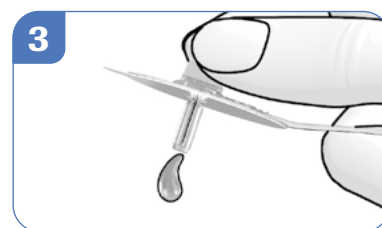

Vul vervolgens de gehele infusieset (slanggedeelte en canule) zoals in de volgende stappen beschreven staat, totdat er een lucht vrije druppel uit de canule komt.


Het bevestigen van de stalen naald




Houd de canule vast aan de handgreep. Verwijder beide stroken afdekfolie van de zelfklevende pleister.




Draai de naaldbeschermer van de naald.

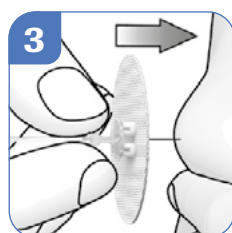

Vorm een huidplooi op de infusieplaats. Breng de infusieset aan onder een hoek van 90°.

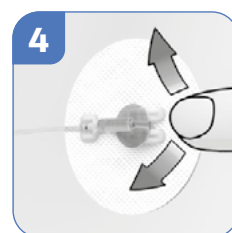

Druk de zelfklevende pleister stevig op de infusieplaats en zorg ervoor dat deze goed vastzit op de huid.

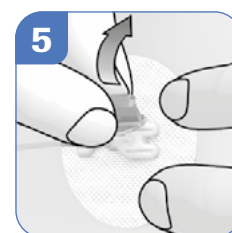

Houd de zelfklevende pleister goed op zijn plaats, terwijl je de handgreep voorzichtig afklikt.

Voor een gedetailleerde instructie en veiligheidsinformatie van de Accu-Chek Insight Rapid infusieset, raadpleeg de gebruikershandleiding in de verpakking. Voor overige informatie kijk op de website www.accu-chek.nl.

Slanglengte	40 cm	70 cm	100 cm
Vulvolume (units)	9 U	13 U	17 U

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSIGHT en ACCU-CHEK INSIGHT RAPID zijn handelsmerken van Roche.
© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care Nederland B.V.
Transistorstraat 41 | 1322 CK Almere | www.accu-chek.nl | 0800 – 022 05 85