

Ampul kunststof 3.15 ml met vulhulp



Was je handen.

Reinig het rubberen membraam van het flesje met een ontsmettingsdoekje.



Trek de zuigerstang langzaam terug om de ampul met lucht te vullen.



Zet het flesje insuline op een harde vlakke ondergrond, zoals een tafel, en duw de blauwe kap op het insulineflesje.



Duw de zuigerstang omlaag, zodat alle lucht uit de ampul in het flesje wordt gebracht.

Houd de zuigerstang met je duim omlaag gedrukt en draai het insulineflesje om.



Laat de zuigerstang langzaam los, zodat de insuline in de ampul kan stromen. Trek niet aan de zuigerstang of duw er niet op zolang deze uit zichzelf beweegt. Trek daarna, zo nodig, de zuigerstang helemaal omlaag om de ampul volledig te vullen.



Tik met je vinger tegen de ampul waardoor eventuele luchtbelletjes loskomen. Duw de vrijgekomen lucht met behulp van de zuigerstang terug in het insulineflesje. Verwijder de blauwe kap van het insulineflesje.



Draai de zuigerstang linksom los van de stop in de ampul.



Verwijder de blauwe kap door er tegelijkertijd aan te draaien en te trekken.



Duw het afsluitdopje stevig op de punt van de ampul totdat het vastklikt.

Lees de handleiding van Accu-Chek Spirit Combo insulinepomp voor gedetailleerde informatie.

ACCU-CHEK en ACCU-CHEK SPIRIT COMBO zijn handelsmerken van Roche.
© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care Nederland B.V.
Transistorstraat 41 | 1322 CK Almere | www.accu-chek.nl | 0800 – 022 05 85