



Infusieset plaatsen

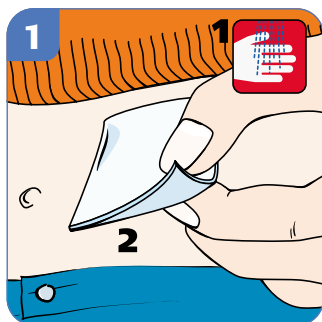

Was je handen.


Reinig de infusieplaats overeenkomstig de aanwijzingen van je zorgverlener.

Laat de infusieplaats voor het aanbrengen van canule opdrogen.

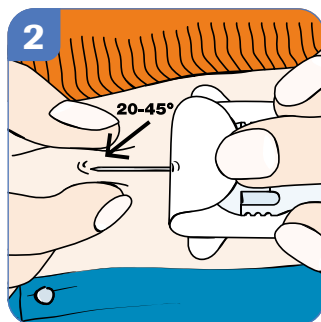


Verwijder de beschermhuls van de inbrengснаald en de voorste afdekfolie en trek met de wijsvinger de zelfklevende pleister iets terug.

Maak met de andere hand op de gereinigde huid een huidplooi en breng de Accu-Chek TenderLink onder een hoek van 20-45° in onder de huid.

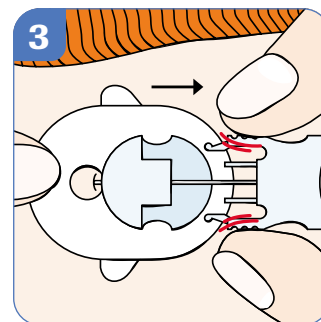


Druk het voorste gedeelte van de zelfklevende pleister stevig op de huid om er zeker van te zijn dat de Accu-Chek TenderLink goed vastzit.

Leg één vinger voor het controlevenster om het vast te houden. Druk licht op de zijklems van de inbrengснаald en trek op hetzelfde moment de inbrengснаald uit de huid.

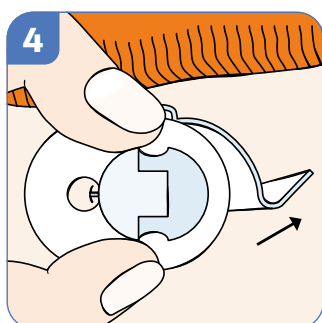

Verwijder de achterste afdekfolie.

Druk de zelfklevende pleister stevig op de huid.

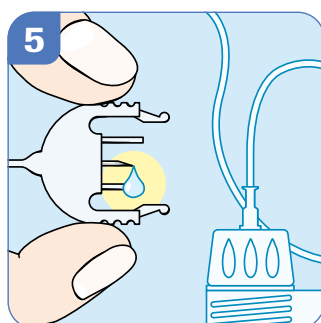


Draai de lueraansluiting in de adapter van de pomp.

Verwijder het ronde beschermkapje door licht op de zijklems te drukken.

Vul de Accu-Chek TenderLink overeenkomstig de gebruiksaanwijzing totdat de medicatie uit de punt van de verbindingsнаald druppelt.

Controleer of er zich geen luchtballen in de infusieset bevinden.

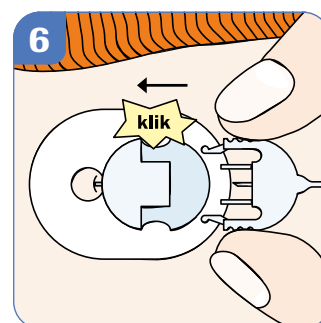

Verbind het zojuist ingebrachte canulegedeelte met de gewelfde kant omhoog. Je hoort een klik als de verbinding vast zit.

Verbind het gevulde slanggedeelte met de canulebehuizing.

Gebruik een insulinebolus van 0.7 eenheden (0.7U) om de canule behuizing en de zachte canule te vullen.

Lees de gebruiksaanwijzingen van Accu-Chek TenderLink voor gedetailleerde informatie.

De Accu-Chek TenderLink infusieset is voor gebruik met de Accu-Chek Combo insulinepomp.

Zachte canule	Lengte	13 mm	17 mm		
	Vulvolume	0.7 U*	0.7 U*		
	Vervangen		elke 2-3 dagen		
Slang	Lengte	30 cm	60 cm	80 cm	110 cm
	Vulvolume	7 U*	10 U*	13 U*	18 U*
*U 100 insuline	Vervangen		elke 6 dagen		

ACCUCHEK en ACCUCHEK TENDERLINK zijn handelsmerken van Roche.
© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care Nederland B.V.
Transistorstraat 41 | 1322 CK Almere | www.accu-chek.nl | 0800 – 022 05 85