


## جهاز الوخز العامل ببطقطة واحدة فقط

### الشد والوخز ببطقطة واحدة


ضبط عمق الوخز  
تدار حلقة الضبط لتحديد  
عمق الوخز المناسب

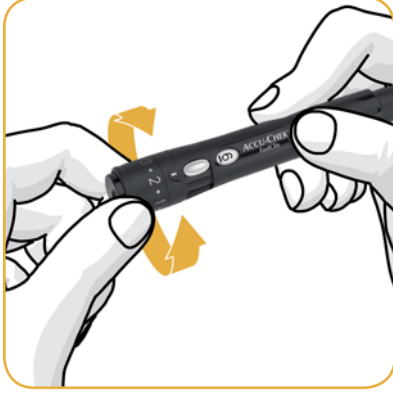

تحصيل نقطة الدم  
الشد والوخز ببطقطة  
واحدة





استبدال المبضع  
حرك المقبض الصغير  
جيتة وذهاباً للحصول على  
مبضع جديد.

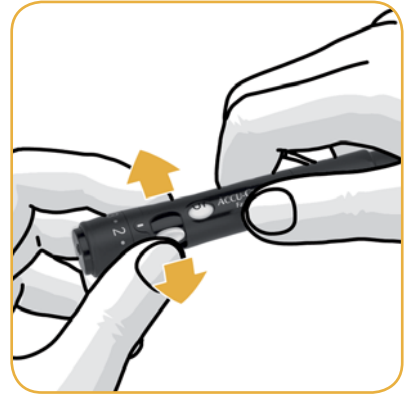


يخصص Accu-Chek FastClix لاستعماله من أجل المراقبة الذاتية ولشخص واحد.  
لا يجوز استعمال جهاز الوخز لأخذ عينة دم من أشخاص مختلفين.

# Accu-Chek® FastClix استبدال حافظة المباحض

- A يزال الغطاء  
B توضع حافظة المباحض  
C يرجع الغطاء إلى مكانه من جديد

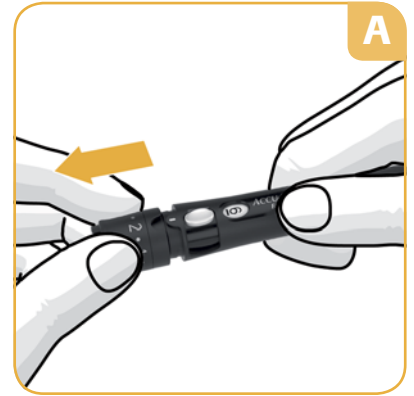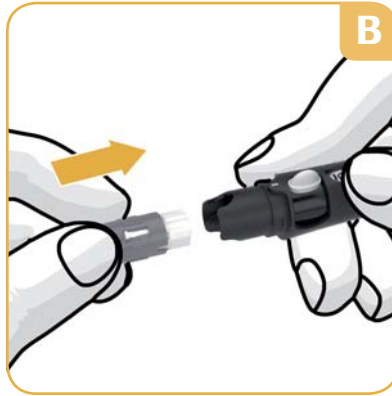

تستبدل الحافظة بعد استعمالك  
المبضع الأخير  
لا يمكن إعادة حافظة المباحض

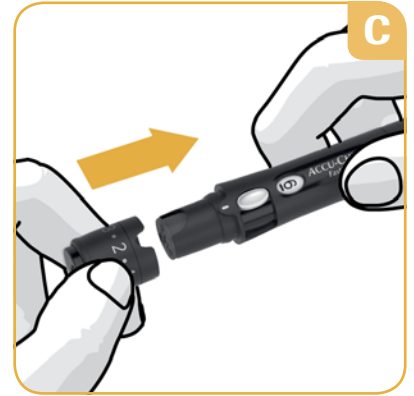


## منتجات Accu-Chek®



Accu-Chek Mobile



Accu-Chek Aviva

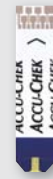

Accu-Chek Aviva Nano

اكتشف الوخز الجديد - ستشكر قمم الأصابع

Accu-CHEK و FASTCLIX هما علامتان تجاريتان عائدتان لـ Roche. © Roche 2012.

[www.accu-chek.nl](http://www.accu-chek.nl)

Roche Diagnostics

0800 - 022 05 85

صندوق البريد 1007

ألخير BA 1300

**ACCUCHEK®**

Roche