


Sadece tek 1 tıklı çalışan enjeksiyon kalemi

Gerip 1 tıklı enjekte etmek



Kan damlacığı almak
Gerip 1 tıklı enjekte etmek

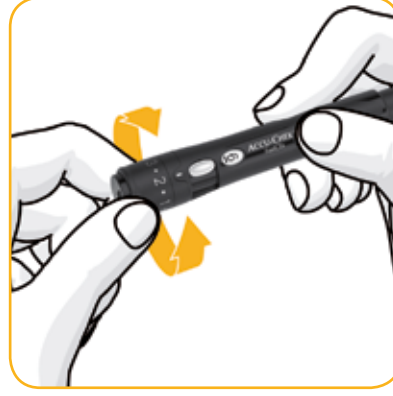

Enjekte derinliğini ayarlamak
Enjekte derinliğini ayarlamak için ayar düğmesini çevir





Neşteri yenilemek
Yeni bir neşter için tutamacı ileri geri çevir




Accu-Chek FastClix tek kişi tarafından kendi kontrolü için kullanmak içindir Enjeksiyon kalemiyle farklı kişilerin kanı alınmamalı.

Accu-Chek® FastClix

Neşter sapını yenilemek

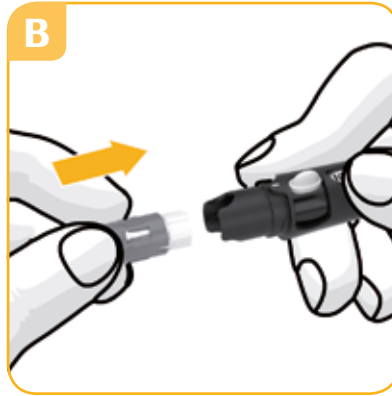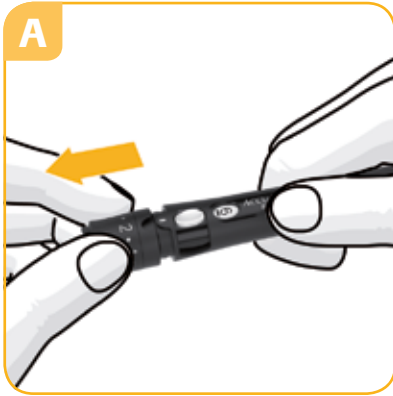


- A Kapağı aç
- B Neşter sapını yerleştir
- C Kapağı yine kaleme tak

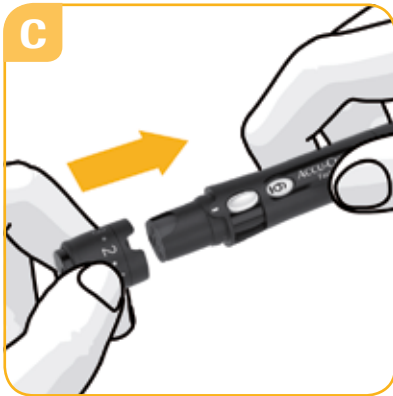

En son neşteri kullandıktan sonra
sapı yenile
Neşter sapı yeniden takılamaz

Accu-Chek® ürünleri

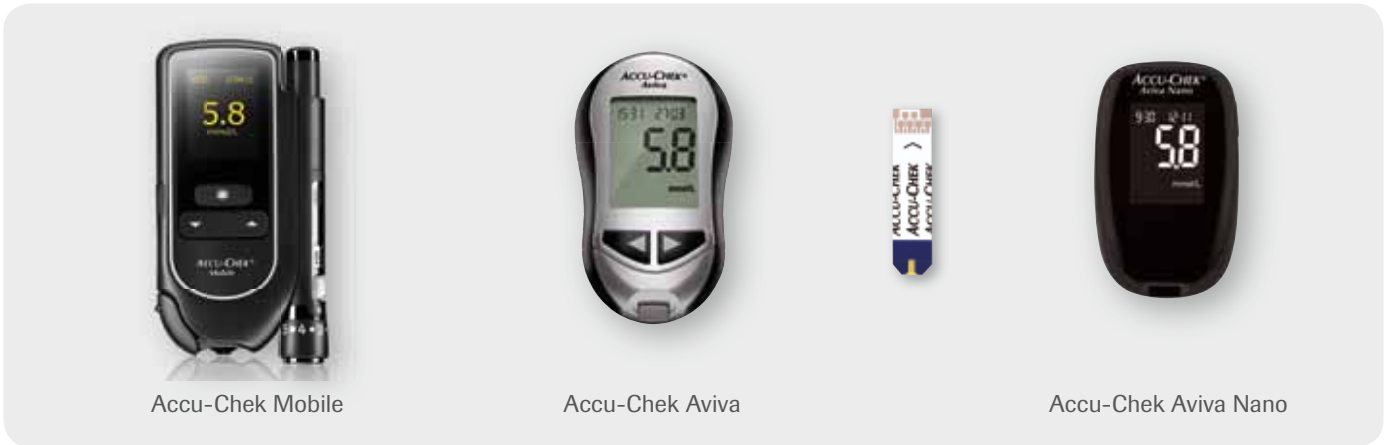

Accu-Chek Mobile

Accu-Chek Aviva

Accu-Chek Aviva Nano

Yeni enjekte yöntemini keşfet - parmak uçlarınız size teşekkür eder

ACCU-CHEK ve FASTCLIX Roche'un ticari markaları. © 2012 Roche.

www.accu-chek.nl

0800-022 05 85

Roche Diagnostics

Postbus 1007

1300 BA Almere



ACCU-CHEK®