


## Nauwkeurig meten, beter leven



### Teststrip invoeren

Neem een Accu-Chek® Aviva teststrip uit de flacon en sluit de flacon. Voer de teststrip in de meter. De meter gaat automatisch aan.

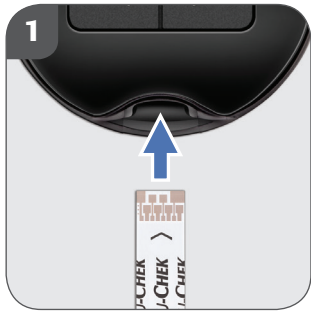

### Display vermeldingen

In de display verschijnen het teststripsymbool en een knipperend bloeddruppelsymbool.



### Bloed aanbrengen

Houd de bloeddruppel tegen de uitsparing aan de voorkant van het gele testveld van de teststrip. Zodra de meter het signaal geeft is er voldoende bloed opgezogen door de teststrip.



### Resultaat aflezen

Na ca. 5 seconden verschijnt het resultaat. Indien gewenst kan nu een markering meegegeven worden aan het resultaat. Verwijder hierna de teststrip uit de meter. De meter gaat automatisch uit.



Bekijk ook de stap-voor-stap instructiefilm op [www.mijnmeterinstructie.nl](http://www.mijnmeterinstructie.nl)

### Meer details?

Raadpleeg de Accu-Chek® Aviva handleiding




## Aanspannen en prikken in 1 klik



**Bloeddruppel verkrijgen**  
Aanspannen en prikken  
in 1 klik



**Prikdiepte instellen**  
Draai de instelring voor  
de juiste prikdiepte

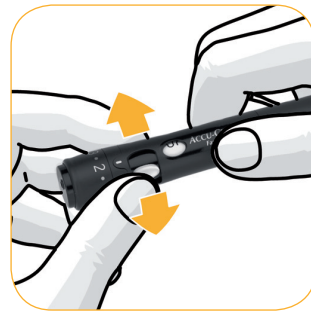

**Lancet vervangen**  
Beweeg het hendeltje  
heen en weer voor een  
nieuw lancet

### Clixmotion technologie voor minder pijnlijk prikken

- Met gepatenteerde technologie die het lancet vanuit twee richtingen stuurt.
- Zorgt voor een soepele heen-en-weerbeweging van het lancet.
- Lancet heeft een smaller wordend, drievlaks geslepen naaldpunt voor verminderde pijn en een soepele doordringing van de huid.



### Ontdek wat mogelijk is.

Ga voor meer informatie naar [www.accu-check.nl](http://www.accu-check.nl) of bel 0800 - 022 05 85 (gratis).



ACCUCHEK, ACCUCHEK AVIVA EN FASTCLIX zijn handelsmerken van Roche. © 2014 Roche. Alle rechten voorbehouden.

Roche Diagnostics • Postbus 1007 • 1300 BA Almere

[www.accu-check.nl](http://www.accu-check.nl)

**11 standen** voor iedere huiddikte

**Het cijfer in het venster** geeft het aantal resterende lancetten aan

Aanspannen en prikken in **1 klik**

**Hendeltje om eenvoudig** een nieuw lancet te verkrijgen

**Zes lancetten** in een houder **Geen** losse lancetten

Ontdek het nieuwe prikken - uw vingertoppen zullen u dankbaar zijn

De Accu-Chek FastClix is bedoeld voor gebruik bij zelfcontrole door één persoon. De prikken mag niet worden gebruikt voor het afnemen van bloed bij verschillende personen, omdat hiervoor geen speciale voorzieningen ter voorkoming van infectiegevaar getroffen zijn.