

Wel een druppeltje bloed, geen venijnige pijn



1 Prikdiepte instellen

Met behulp van de voorste dop stelt u de prikdiepte op uw persoonlijke huiddikte in.



2 Dop eraf halen

Haal de dop van de prikpen om het lancet te plaatsen.



3 Lancet plaatsen

Plaats het lancet tot deze duidelijk vastklikt. Draai daarna het beschermkapje van het lancet en plaats het dopje terug op de prikpen.



4 Prikpen aanspannen

Druk de knop op de achterzijde van de prikpen in om de prikpen aan te spannen. U kunt controleren of de prikpen aangespannen is: de ontspanknop is nu geel gekleurd.



5 Bloed prikken

Kies voor het prikken een zijkant van een vingertopje van bij voorkeur uw ring- of middelvinger. Zet de prikpen tegen uw vinger en druk op de gele ontspanknop.



6 Lancet uitwerpen

Na gebruik kunt u het lancet uitwerpen in een afvalcontainer. Haal hiervoor de voorste dop van de prikpen. Door nu het uitwerpmechanisme naar voren te schuiven valt het gebruikte lancet eruit.



Ontdek wat mogelijk is.

Ga voor meer informatie naar www.accu-chek.nl of bel 0800 - 022 05 85 (gratis).

