



Accu-Chek® Insight Tender

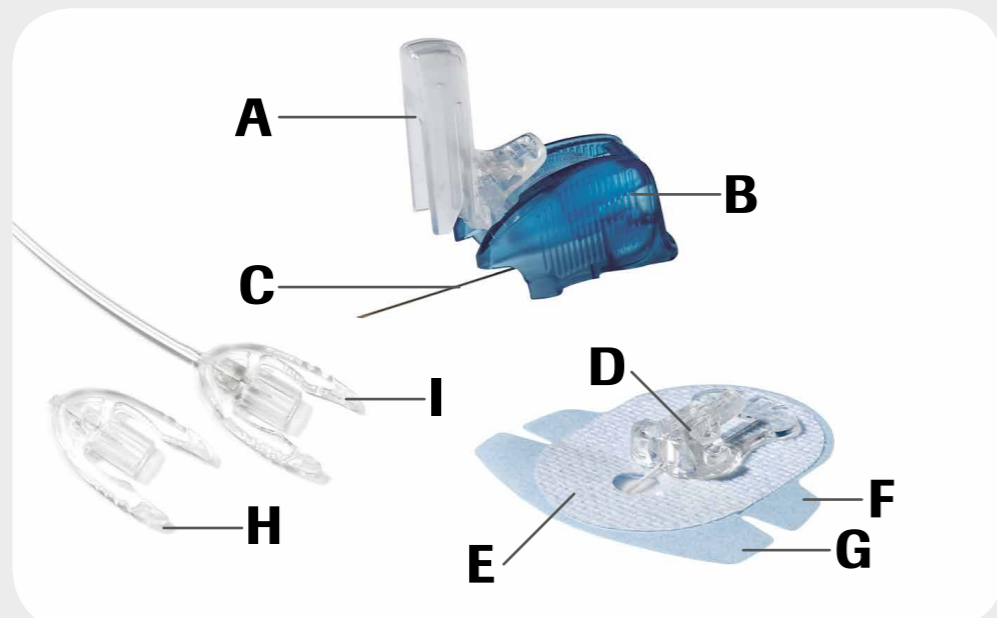


- A** Naaldkapje
- B** Handgreep
- C** Inbrengnaald
- D** Canulebehuizing
- E** Zelfklevende pleister
- F** Achterste deel van afdekfolie
- G** Voorste deel van afdekfolie
- H** Beschermkap
- I** Slanggedeelte

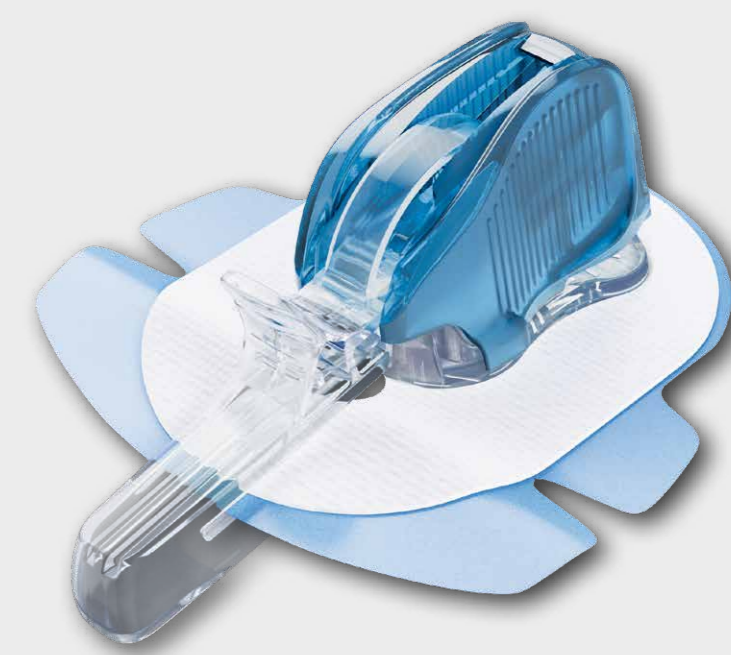


1 Was uw handen en neem de infusieset uit de verpakking. Bepaal de infusieplaats en desinfecteer deze zoals uw behandelaar u heeft geadviseerd.




2 Klap het naaldkapje zo ver mogelijk omhoog.

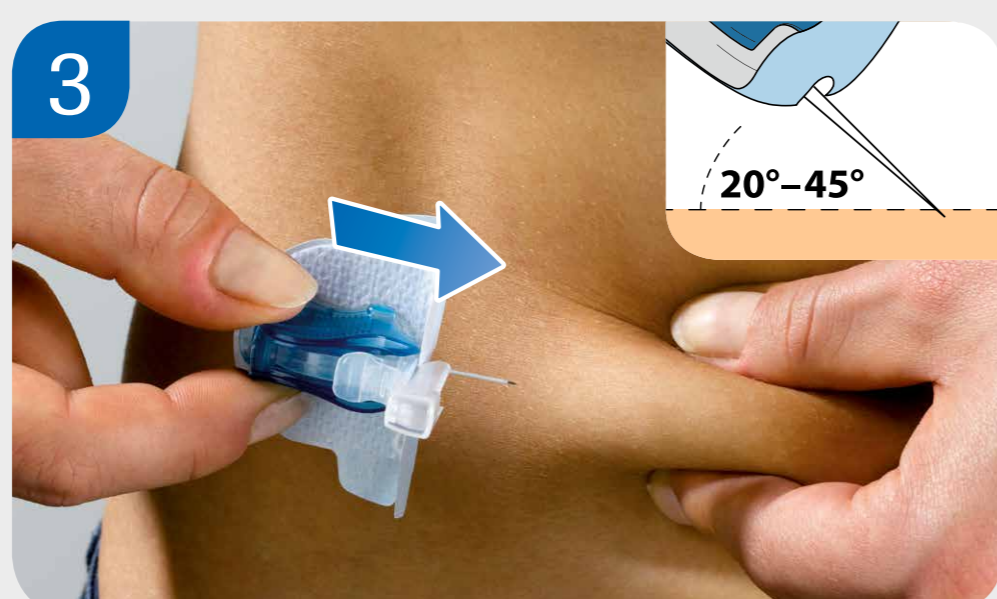


3 Breng de infusieset in onder een hoek van 20 tot 45°. Kies een infusieplaats die niet in de buurt ligt van taille, botten, littekenweefsel, navel of recente toedieningsplaatsen.

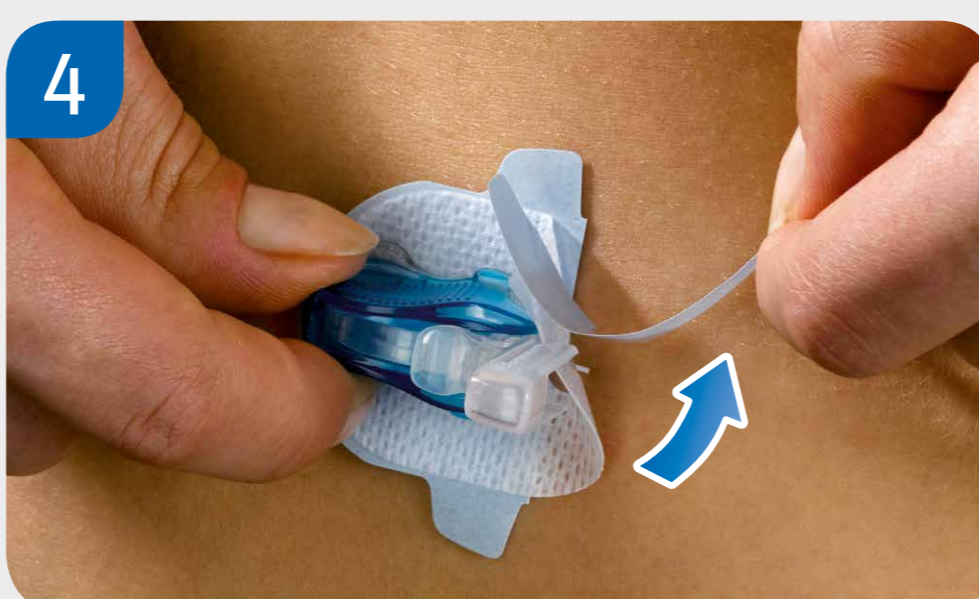

4 Verwijder voorzichtig het voorste deel van de afdekfolie van de zelfklevende pleister.

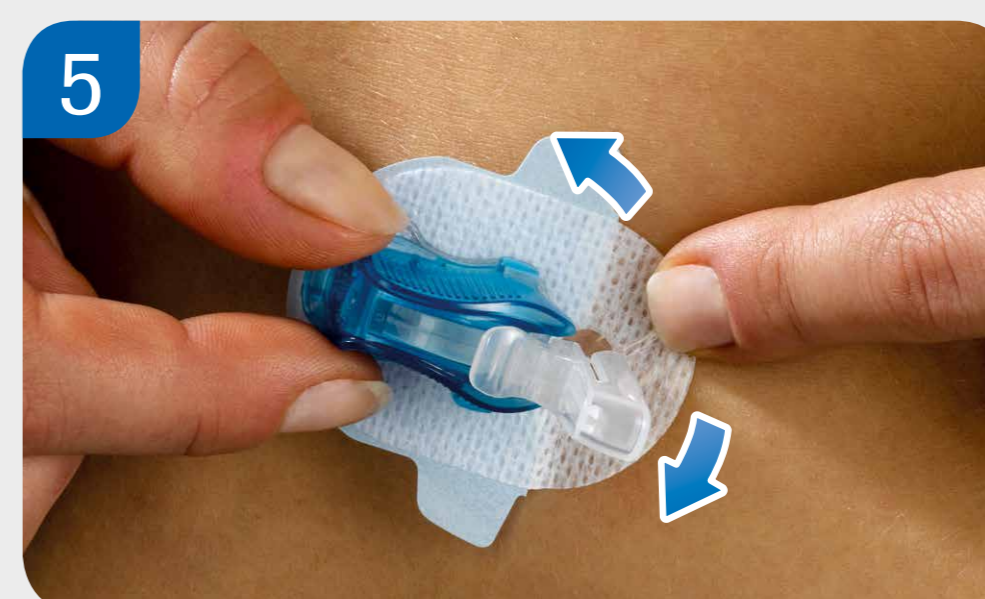

5 Druk het voorste deel van de zelfklevende pleister stevig op de infusieplaats en zorg ervoor, dat deze goed vastzit op de huid.

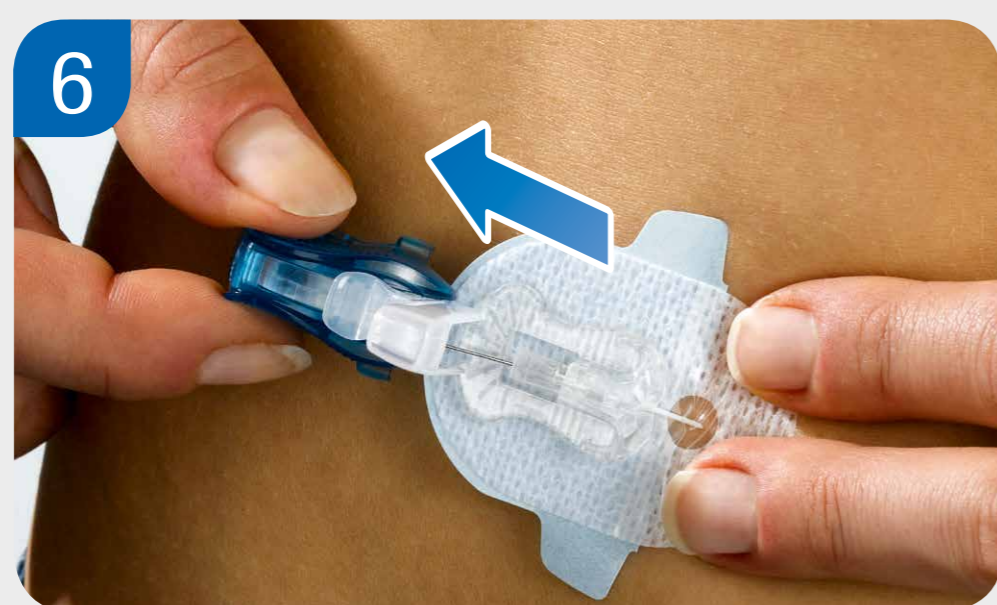


6 Terwijl u de zelfklevende pleister goed op zijn plaats houdt, schuift u de handgreep met de inbrengnaald zijwaarts van de canulebehuizing.




7 Duw het naaldkapje terug in zijn oorspronkelijke positie en zorg ervoor dat het vastklikt. Gooi het geheel weg.




8 Verwijder het achterste deel van de afdekfolie van de zelfklevende pleister.

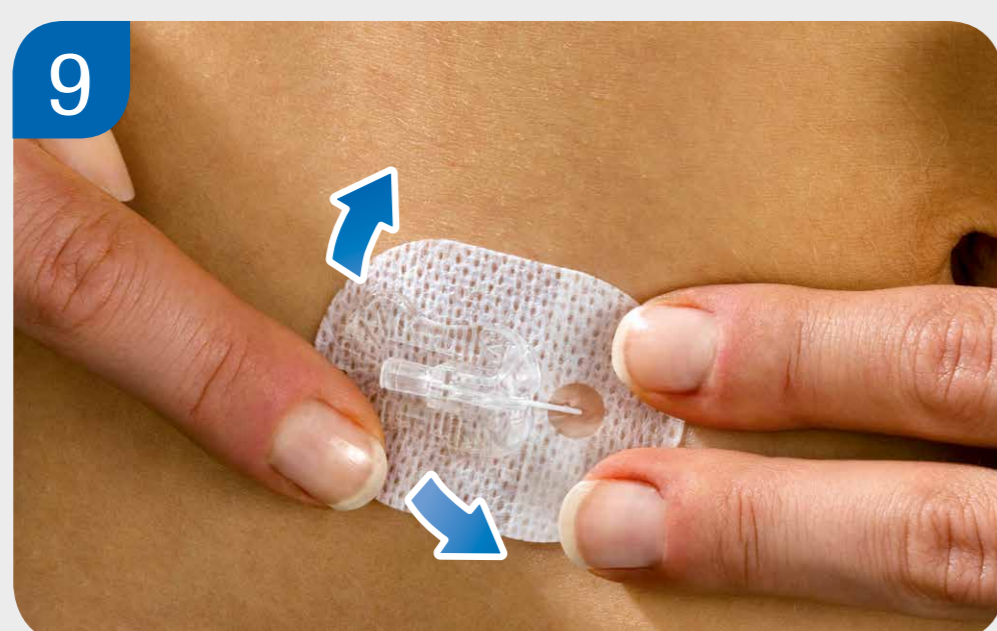

9 Druk de zelfklevende pleister stevig op de infusieplaats en zorg ervoor dat deze goed vastzit op de huid.

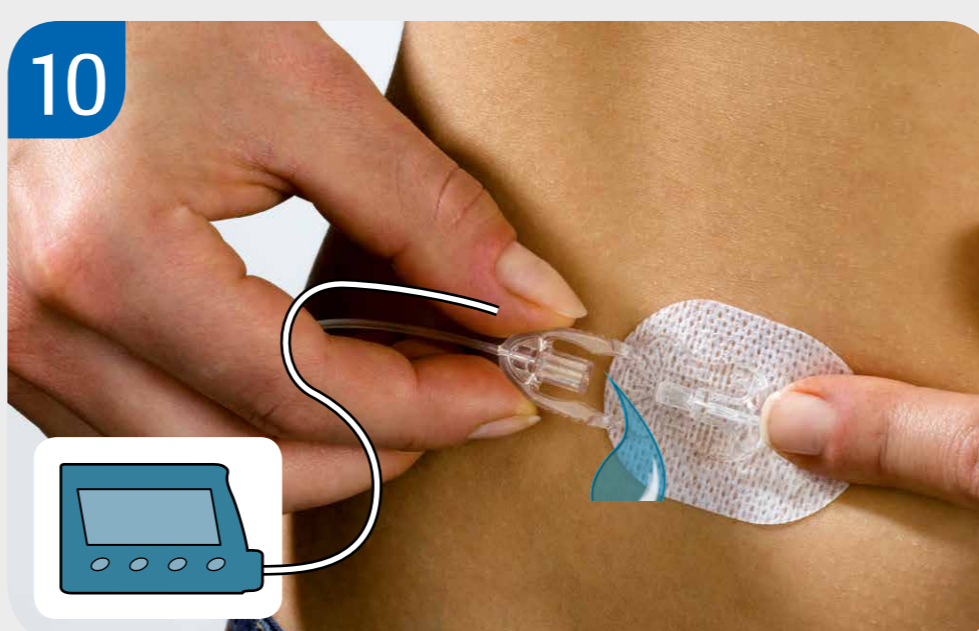

10 Bevestig het slanggedeelte aan op de insulinepomp en vul deze conform de gebruiksaanwijzing van uw insulinepomp. Zorg ervoor dat er geen luchtballen in de slang zitten.

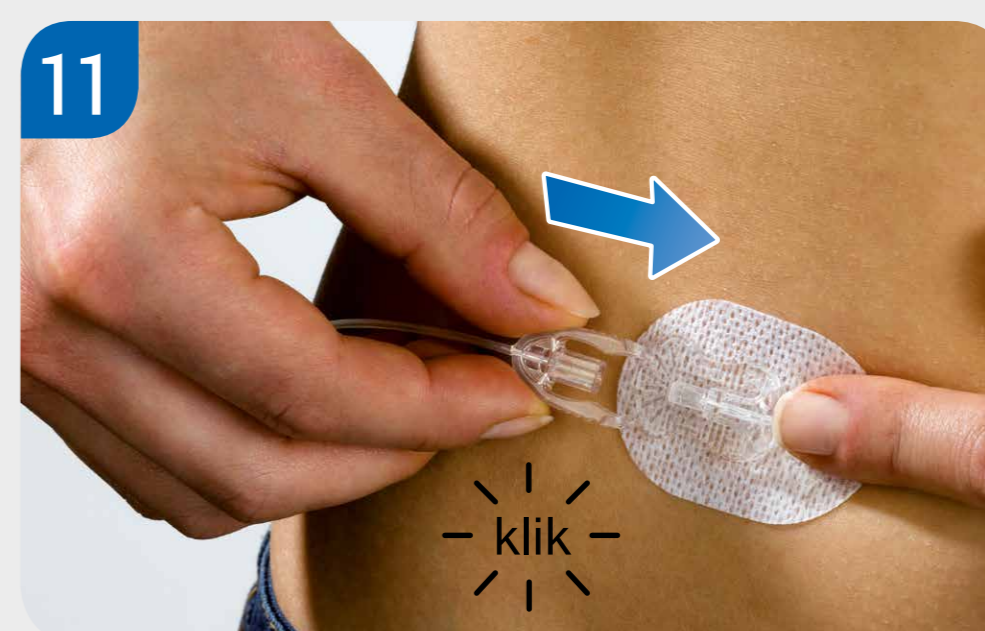

11 Verbind het gevulde slanggedeelte met de canulebehuizing. Vul de canulebehuizing van de infusieset en de zachte canule met 0,9 U insuline en start vervolgens de toediening.

Zachte canule	Lengte:	13 mm	17 mm	
	Vulvolume:	0,9 U*	0,9 U*	
	Vervangen:	elke 2-3 dagen		
Slang	Length:	40 cm	70 cm	100 cm
	Vulvolume:	7 U*	11 U*	15 U*

* U 100 insuline

Lees de gebruiksaanwijzing van Accu-Chek Insight Tender voor gedetailleerde informatie. Deze informatie is ook te vinden op www.accu-chek.nl/stappenkaart-insight-tender

ACCU-CHEK en ACCU-CHEK INSIGHT zijn handelsmerken van Roche.
© 2018 Roche. Alle rechten voorbehouden.

www.accu-chek.nl
Roche Diabetes Care
Postbus 1450
1300 BL Almere



ACCU-CHEK®