



Je diabetesgegevens delen in drie eenvoudige stappen



1. Download en stel de mySugr app in



2. Verbind je Accu-Chek bloedglucosemeter




3. Genereer een deelcode

Download gratis de mySugr app


Scan de code met je telefoon om de app te downloaden en maak vervolgens met je e-mailadres een account aan.




De mySugr app downloaden en instellen

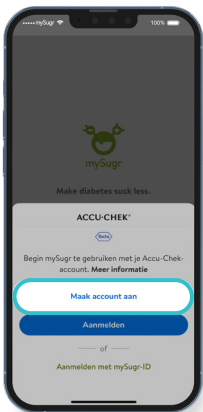

1. Open de mySugr app en tik op 'Maak account aan'.

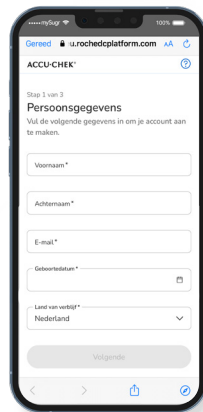


2. Voer je persoonsgegevens in en tik op 'Volgende'.

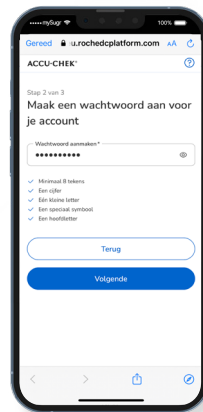

3. Maak een sterk wachtwoord aan en tik op 'Volgende'.




4. Accepteer de verplichte voorwaarden en tik op 'Aanmaken'.

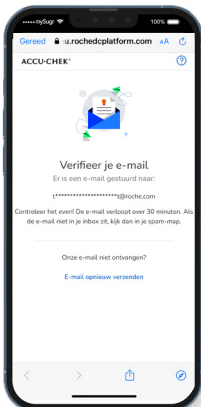


5. Open je mailbox en verifieer je e-mailadres.



6. Open de e-mail van Accu-Chek en tik op 'Verifiëren'.

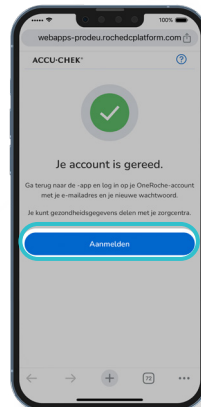

7. Ga terug naar de mySugr app, tik op 'Aanmelden' en voer je e-mailadres en nieuwe wachtwoord in.

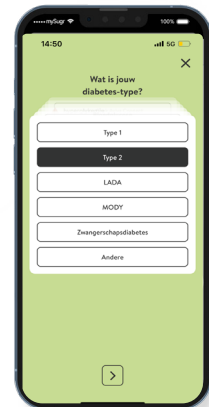

8. Ga verder met het instellen van de mySugr app.

Je Accu-Chek bloedglucosemeter verbinden met de mySugr app




De mySugr app registreert automatisch en draadloos je bloedglucosewaarden wanneer deze verbonden is met een Accu-Chek bloedglucosemeter. Het gebruik van een Accu-Chek meter in combinatie met de mySugr app kan je helpen met het reguleren van je bloedglucose, je geschatte HbA1c, en je inzicht in diabetes verbeteren.^{1,2} Je meter verbinden doe je zo:†


† Als je geen Accu-Chek Instant bloedglucosemeter hebt, neem je contact op met je zorgverlener.




1. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.

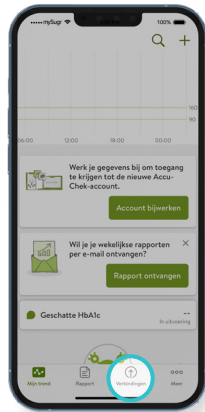

2. Tik in de mySugr app op 'Verbindingen' onderaan het scherm.

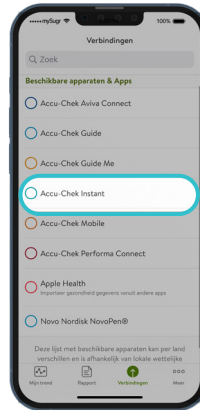

3. Kies je meter uit de lijst.

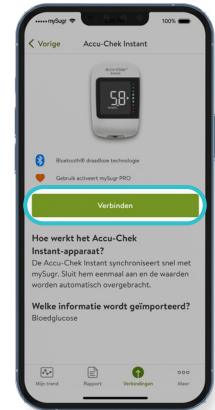

4. Tik op de knop 'Verbinden' en volg de instructies op het scherm.

Een deelcode genereren

Je kunt je diabetesresultaten eenvoudig delen met je zorgverlener, zodat jullie allebei een volledig beeld krijgen van wat je bloedglucose beïnvloedt. Daarvoor vertel je je zorgteam dat je klaar bent om je resultaten met hen te delen via de mySugr app. Zij zullen je dan vragen om een deelcode te genereren met behulp van de mySugr app zodat je veilig kunt verbinden met hun systeem. Zo doe je dat:



1. Tik in de mySugr app op 'Meer'.



2. Tik op 'Gegevensdeling'.



3. Tik op de knop 'Code genereren'.



4. Deel de code met de zorgverlener. De code is 48 uur geldig.

Het mySugr logboek is gelicentieerd voor mensen met diabetes ouder dan 16 jaar. De mySugr Bolus Calculator is gelicentieerd voor mensen met diabetes ouder dan 18 jaar.

Referenties: 1. Debong F, et al. Diabetes Technol Ther. 2019;21(S2):S235-S240. 2. Mayor R, et al. ATTD 2023 poster session: 22-25 February, Berlin, Germany.

Alle weergegeven namen, afbeeldingen en gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor demonstratiedoeleinden, niet voor echte patiënten. De schermen die je ziet, kunnen afwijken van de schermen in de app.



ACCUCHEK, ACCUCHEK INSTANT, MYSUGR en ROCHEDIABETES zijn handelsmerken van Roche. Alle andere productnamen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

© 2024 Roche Diabetes Care Nederland
www.accu-chek.nl | Accu-Chek Customer Care 0800 022 05 85 | Roche Diabetes Care Nederland B.V. | Transistorstraat 41 | 1322 CK Almere
7/2024 Roche Language Services NL-1140

Hulp nodig?

accu-chek.nl
0800 - 022 05 85
almer.icc@roche.com